

Test Kodu	Test Adı	Yöntem	Örnek Türü	Örnek Tüpü	Örnek Miktarı	Saklama Koşulları	Çalışma Günü	Çalışma/Raporlama Süresi	Red Kriterleri
330016	Kromozom analizi - kan	Hücre kültürü	Periferik kan	Heparin	2-3 ml	4°C / 24-48 saat	Pazartesi/Salı/Çarşamba/Cu martesi	21	<ul style="list-style-type: none"> Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler Pıhtılaşmış örnekler Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk Nakliye süresini geçen numuneler Nakliye sırasında sızan numune
330004	Kromozom analizi - AS	Hücre kültürü	Amniyon sıvısı	Enjektör	15-20ml	25°C / 24 saat	Her Gün	21	Amniyon sıvısı iki ayrı enjektör içerisinde alındıktan sonra iğnesi kırılmadan kapağı kapatılmalı ve steril bir eldiven içerisine konup ağız kısmına düğüm atıldıktan sonra 24 saat içerisinde laboratuvara transfer edilmelidir.
330015	Kromozom analizi - CVS	Hücre kültürü	Koryonik villus	Transport Besiyeri	30-50µg	4°C / 12-15 saat	Her Gün	21	Fiksasyona uğramış örnek, miktarı yetersiz örnek, nakliye koşullarına uygun olmayan örnek
330011	Kromozom analizi - kord	Hücre kültürü	Kord kanı (heparinli)	Heparin	2-3ml	4°C / 24-48 saat	Pazartesi/Salı/Çarşamba /Cumartesi	10	<ul style="list-style-type: none"> Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler Pıhtılaşmış örnekler Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk Nakliye süresini geçen numuneler Nakliye sırasında sızan numune
330017	Kromozom analizi - abortus	Hücre kültürü	Abortus materyali	Transport Besiyeri/serum fizyolojik	30-50µg	4°C / 12-15 saat	Her Gün	21	Tahliye materyalleri alındıktan sonra laboratuvara gönderilinceye kadar +4°C de (buzdolabının kapak rafı içerisinde) saklanmalıdır. Serum fizyolojik içerisinde gelmelidir. Kesinlikle formol yada formaldehit konulmamalıdır.
330010	Kromozom analizi - cilt dokusu	Hücre kültürü	Cilt dokusu	Transport Besiyeri/serum fizyolojik	30-50µg	4°C / 12-15 saat	Her Gün	21	Cilt dokusu örneği alındıktan sonra laboratuvara gönderilinceye kadar +4°C de (buzdolabının kapak rafı içerisinde) saklanmalıdır. Serum fizyolojik içerisinde gelmelidir. Kesinlikle formol yada formaldehit konulmamalıdır.
330014	Kromozom analizi - kemik iliği	Hücre kültürü	Kemik iliği	Heparin* *Enjektörün heparin ile yıkanması gerekmektedir	1-3 ml	4°C / 12-15 saat	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler Pıhtılaşmış örnekler Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk Nakliye süresini geçen numuneler Nakliye sırasında sızan numune
333014	FISH - rapid FISH 13, 18, 21, X ve Y	FISH analizi	Heparinli Kan /Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler Pıhtılaşmış örnekler Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk Nakliye süresini geçen numuneler Nakliye sırasında sızan numune
333017	FISH - sperm FISH 13, 18, 21, X ve Y	FISH analizi	Sperm	Steril Numune Kabı	5 ml	37°C	Her Gün	15	Transport işlemi sırasında buz vb. malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Yetersiz numune kabul edilmemektedir.
333020	FISH - DNA fragmantasyon Tunnel Testi	FISH analizi	Sperm	Steril Numune Kabı	5 ml	37°C	3 Günde 1	7	Transport işlemi sırasında buz vb. malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Yetersiz numune kabul edilmemektedir.

332087	Mikrodelesyon FISH - Alagille <i>JAG1 (20p12.2)</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333012	Mikrodelesyon FISH - Cri-du-Chat <i>5p15.2</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333013	Mikrodelesyon FISH - DiGeorge/VCFS <i>22q11.2</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333015	Mikrodelesyon FISH - Kallmann <i>KAL1 (Xp22.3)</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332089	Mikrodelesyon FISH - Nörofibromatozis <i>NF1 (17q11.2)</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333016	Mikrodelesyon FISH - Prader-Willi/Angelman <i>SNRPN (15q11.2)</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333055	Mikrodelesyon FISH - Smith-Magenis <i>RAI1 (17p11.2)</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333019	Mikrodelesyon FISH - Wolf-Hirschhorn <i>WHSC (4516.3)</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332107	Mikrodelesyon FISH - SRY <i>SRY - (Yp11.31)</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

332111	Mikrodelesyon FISH - Miller-Dieker (17p13.3)	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332112	Subtelomerik FISH-16	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332113	Subtelomerik FISH-17	FISH analizi	Periferik Kan-Kord Kanı/Amniyon/Koryonik villus	Heparin/Enjektör/Transp ort Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	25°C / 4°C / 4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331440	QT Sendromu, uzun tip 1-kısa tip 2 / Jervell ve Lange-Nielsen sendromu Gen Adı: KCNQ1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331943	Maternal kontaminasyon testi	Fragman analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331946	Genotipleme (Freezing öncesi)	Fragman analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331932	Kardiyovasküler risk paneli - 12 mutasyon Faktör II protrombin (G20210A), Faktör V (G1691A , H1299R), MTHFR (C677T , A1298C), Faktör XIII (V34L), β-Fibrinojen (-455 G-A), PAI-1 (4G/5G), HPA-1 (a/b), ACE (I/D), ApoB (R3500Q), ApoE (e2/e3/e4)	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300406	Moleküler Karyotipleme-Postnatal-Illumina 300K	SNP Array	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	28	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300408	Moleküler Karyotipleme --Prenatal-Illumina 300K Maternal kontaminasyon testi dahildir, materyal ile anneye ait EDTA'lı kan gönderilmelidir.	SNP Array	Kord kanı (EDTA) Amniyosentez CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml 10 ml 15 mg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300514	Trombofil paneli - 3 mutasyon Faktör II G20210A / Faktör V Leiden / MTHFR C677T	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331986	Trombofil paneli - 4 mutasyon Faktör II G20210A / Faktör V Leiden / MTHFR A1298C ve C677T	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300163	Trombofil paneli - 6 mutasyon Faktör II G20210A / Faktör V Leiden / MTHFR A1298C ve C677T, PAI-1, Faktör V R2	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300151	Angelman/Prader Wili - MLPA Analizi Lokasyon:15q11	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330790	Diabetes mellitus, neonatal 3 / Hiperinsülinemik hipoglisemi, ailevi 1 Gen Adı:ABCC8	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331995	ACE mutasyon analizi	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332052	Aortik Anevrizma, ailevi, torasik 6 / Moyamoya hastalığı 5 / Multisistemik düz kas disfonksiyon sendromu Gen Adı:ACTA2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330800	Kardiyomiopati dilate 1R / hipertrofik 11 Gen Adı:ACTC1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
900160	Adenozin Deaminaz eksikliği / Ağır kombine immün yetmezlik Gen Adı:ADA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

53330810	Adenilosüksinaz eksikliği Gen Adı:ADSL	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330820	Spinocerebellar Ataksi 28 / Spastik Ataksi, 5 / Optik atrofi 12 Gen Adı:AFG3L2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330830	Aspartilglukosaminüri Gen Adı:AGA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330840	Lipodistrofi, konjenital, generalize, tip1 Gen Adı:AGPAT2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300561	Hiperokzaluri, primer, tip 1 Gen Adı:AGXT	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330850	Diabetes mellitus, tip II / hipoinsülinemlik hipoglisemi, hemihipertrofi Gen Adı:AKT2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300562	Sideroblastik anemi (X'e bağlı) Gen Adı:ALAS2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300617	Adenomatöz polipozis koli / Gardner sendromu Gen Adı:APC	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330870	Hiperkolesterolemi, ailevi Gen Adı:APOA2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

53330880	Hiperkolesterolemi, ailevi, 2 / Hipobetalipoproteinemi Gen Adı:APOB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330042	APOE Analizi Gen Adı:APOE	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330890	MODY Tip 14 Gen Adı:APPL1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330900	Androjen İnsensitivite Sendromu Gen Adı:AR	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300645	Kennedy Hastalığı (X linked, üçlü tekrar) Gen Adı:AR	Fragman analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332031	Metakromatik Lökodistrofi Gen Adı:ARSA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330910	Mukopolisakkaridozis tip 6 (Maroteaux-Lamy) Gen Adı:ARSB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300411	Proud sendromu / Lizensefali X'e bağlı,2 / Gelişimsel ve epileptik ensefalopati Gen Adı:ARX	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331972	Canavan hastalığı Gen Adı:ASPA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300563	Sitrülinemi Gen Adı:ASS1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300257	Shashi-Pena sendromu Gen Adı:ASXL2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330920	Wilson hastalığı Gen Adı:ATP7B	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330930	Akçağaç şurubu idrar hastalığı, tip 1a (MSUD) Gen Adı:BCKDHA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330940	Akçağaç şurubu idrar hastalığı, tip 1b (MSUD) Gen Adı:BCKDHB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330950	MODY Tip 11 Gen Adı:BLK	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331950	Noonan sendromu, 7 / Kardiyofasyokütanoz sendrom / LEOPARD sendromu 3 Gen Adı:BRAF	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	30	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330960	Multifokal Epilepsi sendromu, ölümcül, neonatal Gen Adı:BRAT1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330970	Lipodistrofi, konjenital generaliz, tip 2 Gen Adı:BSCL2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

53330980	Biyotinidaz Eksikliği Gen Adı:BTB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300618	Kandidiyazis, ailevi, 2 Gen Adı:CARD9	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300564	Otoimmün lenfoproliferatif sendrom, tip II Gen Adı:CASP10	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300565	Hipokalsemi Gen Adı:CASR	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53330990	Lipodistrofi, ailevi parsiyel, tip 7 Gen Adı:CAV1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331000	Lipodistrofi, konjenital generalize, tip 4 Gen Adı:CAVIN1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300566	Hiperparatiroidizm / Paratiroid adenoma Gen Adı:CDK73	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331010	MODY Tip 8 Gen Adı:CEL	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331020	Epilepsi, ilerleyici miyoklonik, 8 Gen Adı:CERS1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

331926	Kistik fibrozis - tüm gen dizi analizi Gen Adı:CFTR	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332018	Kistik fibrozis - MLPA Analizi Gen Adı:CFTR	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330069	Kistik fibrozis -50 mutasyon Gen Adı:CFTR	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331030	Gelişimsel ve epileptik ensefalopati, 94 Gen Adı:CHD2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300413	Miyotoni konjenita Gen Adı:CLCN1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332041	Osteopetrozis, resesif 4-dominant 2 / Hipopigmentasyon, organomegali Gen Adı:CLCN7	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331040	Seroid Lipofuksinozis, nöronal 1 Gen Adı:PPT1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331050	Epilepsi, ilerleyici miyoklonik, 3 Gen Adı:KCTD7	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331060	Seroid Lipofuksinozis, nöronal 2 Gen Adı:TPP1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53331070	Seroid Lipofuksinozis, nöronal 5 Gen Adı:CLN5	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331080	Seroid Lipofuksinozis, nöronal 6 Gen Adı:CLN6	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331090	Seroid Lipofuksinozis, nöronal 7 Gen Adı:MFSD8	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331100	Seroid Lipofuksinozis, nöronal 8 Gen Adı:CLN8	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300568	Myastenik sendrom, konjenital, 5 Gen Adı:COLQ	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332034	Soğuk ile tetiklenen terleme sendromu, 1 Gen Adı:CRLF1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300569	Osteogenesis imperfekta, tip 7 Gen Adı:CRTP	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331110	Seroid Lipofuksinozis, nöronal, 10 Gen Adı:CTSD	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331120	Konjenital Adrenal Hiperplazi, 11 beta hidroksilaz eksikliği Gen Adı:CYP11B1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53331130	Aromataz eksikliği Gen Adı:CYP19A1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331140	Konjenital Adrenal Hiperplazi, 21 hidroksilaz eksikliği - Dizi Analizi Gen Adı:DMD	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300646	Konjenital Adrenal Hiperplazi, 21 hidroksilaz eksikliği - MLPA Analizi Gen Adı:DMD	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331150	Serebrotendinöz Ksantomatozis Gen Adı:CYP27A1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331160	Akçağaç şurubu idrar hastalığı, tip 2 (MSUD) Gen Adı:DBT	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331180	Smith-Lemli-Opitz Sendromu (SLOS) Gen Adı:DHCR7	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300570	Spondylocostal dizostoz, 1 Gen Adı:DLL3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300602	Duchenne Musküler Distrofi (DMD) - Dizi Analizi Gen Adı:DMD	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330043	Duchenne Musküler Distrofi (DMD) - MLPA Analizi Gen Adı:DMD	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

331961	Myotonik Distrofi tip 1 (DM1) Gen Adı:DMPK	Fragman Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332055	Myastenik sendrom, konjenital 10 / Fetal akinezi deformasyon sekansı 3 Gen Adı:DOK7	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300622	Miyoshi Musküler Distrofi 1/ Limb-girdle msküler distrofi, 2 Gen Adı:DYSF	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331951	Distoni, torsiyon (GAG delesyonu) Gen Adı:DYT1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332040	Nötropeni, ağır konjenital 1 Gen Adı:ELANE	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300572	Epilepsi, ilerleyici myoklonik 2A (Lafora) Gen Adı:EPM2A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331200	Multipl Ekzostoz, tip 1 Gen Adı:EXT1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331210	Multipl Ekzostoz, tip 2 Gen Adı:EXT3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300628	Anjiödem, kalıtsal, 3 / Faktör 12 eksikliği Gen Adı:F12	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

53331220	Faktör 13A eksikliği Gen Adı:F13A1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300624	Faktör 7 eksikliği Gen Adı:F7	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333123	Hemofili A Gen Adı:F8	Bağlantı analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332046	Hemofili B / Trombofili, X'e bağlı, F9 defekti Gen Adı:F9	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331240	Tirozinem, tip 1 Gen Adı: FAH	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300606	Marfan Sendromu / MASS sendromu / Weill-Marchesani sendromu 2 Gen Adı:FBN1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300518	Beta-Fibrinojen mutasyon analizi - -455G>A Gen Adı:FGB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331250	Afibrinojemi, konjenital / Disfibrinojemi / Hipofibrinojemi Gen Adı:FGB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300574	Hipofosfatamik rikets / Tümörel kalsinöz, hiperfosfatemik Gen Adı:FGF23	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

3300575	Multiple sinostoz sendromu 3 Gen Adı:FGF9	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300576	Antley-Bixler sendromu / Apert sendromu / LADD sendromu / ... Gen Adı:FGFR2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330041	Akondroplazi / hipokondroplazi Gen Adı:FGFR3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330064	Tanatoforik displazi Gen Adı:FGFR3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300412	Birt-Hogg-Dube sendromu / Pnömotoraks, primer Gen Adı:FLCN	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300625	Kardiyomyopati, Hipertrofik Tip 26 / Restriktif 5 Gen Adı:FLCN	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331927	Frajil X Gen Adı:FMR1	Fragman analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331260	Nörodejenerasyon, serebral folat transport eksikliğine bağlı Gen Adı:FOLR1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330047	Faktör II (protrombin) mutasyon analizi Gen Adı:FII	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300493	Faktör V leiden mutasyon analizi Gen Adı: FV	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300515	Faktör V R2 mutasyon analizi Gen Adı: FV	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332017	Faktör XII (HAE) mutasyon analizi Gen Adı: FXII	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331992	Faktör XIII mutasyon analizi Gen Adı: FXIII	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331952	Friedreich Ataksisi (FRDA) Gen Adı: FXN	Fragman analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332028	Glikojen Depo Hastalığı Tip1A (Von Gierke) Gen Adı: G6PC	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331270	Nötropeni, konjenital, 4 / Dursun sendromu Gen Adı: G6PC3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332035	Hemolitik anemi, G6PD eksikliği Gen Adı: G6PD	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331280	Glikojen Depo Hastalığı, 2 (Pompe) Gen Adı: GAA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

332027	Galaktokinaz Eksikliği Katarakt Gen Adı:GALK1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300213	Mukopolisakkaridozis, IVA Gen Adı:GALNS	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332026	Galaktozemi Gen Adı:GALT	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332037	Hipoparatiroidizm, sensörinöral işitme kaybı, renal displazi Gen Adı:GATA3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300506	Gaucher hastalığı Gen Adı:GBA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331290	MODY Tip 2 / Diabetes mellitus, neonatal 1 Gen Adı:GCK	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300577	Brakidaktili / Multipl sinostoz sendromu 2 / Semfalangizm, proksimal, 1B / ... Gen Adı:GDF5	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332024	Charcot-Marie-Tooth nöropati, X-e bağlı, 1 Gen Adı:GJB1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330053	İşitme kaybı, 1A (connexin-26) Gen Adı:GJB2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

3300179	Spastik parapleji, 44 / Lökodistrofi, hipomyelinizan,2 Gen Adı:GJC2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332021	Fabry hastalığı Gen Adı:GLA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333130	Mukopolisakkaridozis Tip 4B / GM1-gangliodozis 1-3 Gen Adı:GLB1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300578	Glisin ensefalopatisi - MLPA Analizi Gen Adı:GLDC	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300609	Mukolipidozis II-III (I-Cell hastalığı) Gen Adı:GNPTAB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331310	Epilepsi, ilerleyici myoklonik 6 Gen Adı:GOSR2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331320	Epilepsi, fokal ve konuşma bozukluğu Gen Adı:GRIN2A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331330	Mukopolisakkaridoz, 7 Gen Adı:GUSB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333134	Nötropeni, ağır konjenital 3 Gen Adı:HAX1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

333135	Alfa Talasemi - Dizi Analizi Gen Adı:HBA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331940	Alfa Talasemi - MLPA Analizi Gen Adı:HBA1-2	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330040	Beta Talasemi - Dizi Analizi Gen Adı:HBB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300212	Beta Talasemi - MLPA Analizi Gen Adı:HBB	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330055	Orak hücre anemisi (Sickle cell anemi) Gen Adı:HBB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330049	Hemokromatozis Gen Adı:HFE	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331944	Çölyak Hastalığı (HLA-DQ2/DQ8) Gen Adı:HLA	RT-PCR	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331945	Spondilartropati (HLAB27) Gen Adı:HLAB27	Jel elektroforezi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332070	Behçet Hastalığı (HLAB5) Gen Adı:HLAB5	RT-PCR	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

3300580	HMG-CoA liyaz eksikliği Gen Adı:HMGL	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331360	MODY Tip 3 Gen Adı:HNF1A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331370	Diabetes mellitus, Tip 2 Gen Adı:HNF1B	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331380	MODY Tip 1 Gen Adı:HNF4A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300516	Trombosit Antijeni HPA1 Gen Adı:HPA1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53300627	Adrenal hiperplazi, 3-beta-hidroksisteroiddehidrogenaz 2 eksikliği Gen Adı:HSD382	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331954	Huntington Hastalığı Gen Adı:HTT	Fragman analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332069	Mukopolisakkaridozis Tip II (MPS Tip II) (Hunter Sendromu) Gen Adı:IDS	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	30	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332019	Mukopolisakkaridozis Tip Ih/s (Hurler sendromu) Gen Adı:IDUA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	30	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53331390	MODY Tip 10 / Diabetes mellitus, neonatal 4 Gen Adı:INS	Dizi analizi	EDTA Kan	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331400	İzovalerik Asidemi Gen Adı:IVD	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331410	Epilepsi, ilerleyici myoklonik7 Gen Adı:KCNC1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331420	Uzun QT Sendromu, 2 Gen Adı:KCNH2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331430	MODY Tip 13 / Diabetes mellitus, neonatal 3 Gen Adı:KCNJ11	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331450	MODY Tip 7 Gen Adı:KLF11	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331463	Danon hastalığı Gen Adı:LAMP2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333203	Norum hastalığı / Fish-eye hastalığı Gen Adı:LCAT	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331470	Hiperkolesterolemi, ailevi, 1 Gen Adı:LDLR	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53331480	Monogenik Obezite, Leptin eksikliği Gen Adı:LEP	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331490	Morbid Obezite, Leptin Reseptör eksikliği Gen Adı:LEPR	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331500	Wolman hastalığı / Kolesterol ester depo hastalığı Gen Adı:LIPA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331510	Lipodistrofi, parsiyel, 6 Gen Adı:LIPE	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331520	Lipodistrofi, parsiyel 2 / Emery-Dreifus müsküler distrofi 2,3 / ... Gen Adı:LMNA	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331530	Lipoprotein Lipaz eksikliği Gen Adı:LPL	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331540	Obezite Gen Adı:MC4R	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331975	Rett Sendromu - Dizi Analizi Gen Adı:MECP2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331941	Rett sendromu - MLPA Analizi Gen Adı:MECP2	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

330036	Ailese Akdeniz Ateşi (FMF) - tüm gen Gen Adı:MEFV	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330037	Ailese Akdeniz Ateşi (FMF) - 15 mutasyon Gen Adı:MEFV	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331550	Lynch Sendromu - MLH1 Gen Adı:MLH1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331560	Metilmalonik asidüri, vitamin B12 yanıtı Gen Adı:MMAB	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300581	Konjenital glikolizasyon hastalığı, 1b Gen Adı:MPI	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332022	Charcot-Marie-Tooth (CMT1A) - 1B,2I-J Gen Adı:MPZ	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331570	Lynch Sendromu - MSH2 Gen Adı:MSH2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331580	Lynch Sendromu - MSH6 Gen Adı:MSH6	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300341	Leber herediter optic nöropati (LHON) mutasyon analizi Gen Adı:MTND	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	30	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53331590	Metilmalonik asidüri Gen Adı:MUT	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300582	Mevalonik asidüri / Hiper-IgD sendromu Gen Adı:MCK	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331600	Kardiyomyopati, hipertrofik, 4 / dilate 1MM Gen Adı:MYBPC3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331610	Kardiyomyopati, hipertrofik, 1 / dilate 1S Gen Adı:MYH7	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331620	Kardiyomyopati, hipertrofik, 10 Gen Adı:MYL2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331630	Kardiyomyopati, hipertrofik, 8 Gen Adı:MYL3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333164	Mukopolisakkaridozis, tip 3B (Sanfilippo B) Gen Adı:NAGLU	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330063	Sialidoz, tip 1-2 (Nörominidaz) Gen Adı:NEU1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331650	MODY Tip 6 Gen Adı:NEUROD1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

333166	Nörofibromatozis, tip 1 Gen Adı:NF1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300404	Nörofibromatozis, tip 2 Gen Adı:NF2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300583	Epilepsi, ilerleyici miyoklonik 2B (Lafora) Gen Adı:NHLRC1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331974	CADASIL / Lateral meningesel sendromu Gen Adı:NOTCH3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	30	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331670	Niemann-Pick hastalığı tip C1,D Gen Adı:BPC1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331680	Niemann-Pick hastalığı, tip C2 Gen Adı:NPC2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300255	Retinitis pigmentosa 37 Gen Adı:NR2E3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331690	Cinsiyet Gelişim Bozukluğu, 3-4 Gen Adı:NRSA1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332058	Osteopetrozis, 5 Gen Adı:OSTM1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

3300650	Okülofaringeal müsküler distrofi - OPMD Gen Adı:PABPN1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332053	Fenilketonüri Gen Adı:PAH	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331991	PAI-1 analizi Gen Adı:PAI	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331710	Ailesel Meme Kanserine yatkınlık / Fankoni anemisi, kompleman grup N Gen Adı:PALB2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331720	Hiperkolesterolemi, ailevi, 3 Gen Adı:PCSK9	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300584	Glikosilfosfatidilinositol eksikliği Gen Adı:PIGM	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331730	Lipodistrofi, parsiyel, 4 Gen Adı:PLIN1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331740	Kardiyomiopati dilate 1P / hipertrofik 18 Gen Adı:PLN	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300191	Spastik parapleji 2, X-e bağlı / Pelizaeus-Merzbacher hastalığı Gen Adı:PLP1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	20	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

3300585	Konjenital glikolizasyon hastalığı, 1a Gen Adı:PMM2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332023	Charcot-Marie-Tooth (CMT1A) - Dizi Analizi Gen Adı:PMP22	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331942	Charcot-Marie-Tooth (CMT1A) - MLPA Analizi Gen Adı:PMP22	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331750	Lynch sendromu - PMS2 Gen Adı:PMS2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331760	Obezite, adrenal yetmezlik ve kırmızı saç Gen Adı:POMC	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331770	Lipodistrofi, parsiyel, 3 Gen Adı:PPARG	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300586	Hemofagositik lenfhistiyoz, ailevi, 2 Gen Adı:PRF1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331780	Wolff-Parkinson-White sendromu / Glikojen depo hastalığı, kalp, ölümcül Gen Adı:PRKAG2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331790	Atipik Gaucher/Krabbe hastalığı /n Kombine SAP eksikliği Gen Adı:PSAP	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

333180	Cowden Sendromu, 1 / Lhermitte-Duclos sendromu Gen Adı:PTEN	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300587	Noonan Sendromu, 1 Gen Adı:PTPN11	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332050	Griscelli Sendromu, 2 Gen Adı:RAB27A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332054	Myastenik sendrom, konjenital 11 / Fetal akinezi deformasyon sekansı 2 Gen Adı:RAPSN	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300588	Diamond-Blackfan Anemisi 7 Gen Adı:RPL11	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300589	Diamond-Blackfan Anemisi 6 Gen Adı:RPL5	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300590	Diamond-Blackfan Anemisi 9 Gen Adı:RPS10	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332033	Diamond-Blackfan Anemisi 1 Gen Adı:RPS19	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300591	Diamond-Blackfan Anemisi 10 Gen Adı:RPS26	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

332042	Shwachman-Diamond sendromu Gen Adı:SBDS	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300153	Dravet Sendromu / Migren, ailevi, hemiplejik 3 / Gelişimsel ve epileptik ensefalopati 6B Gen Adı:SCN1A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331810	Brugada sendromu 1 / Kardiyomiyopati dilate 1E / Uzun QT sendromu 3 Gen Adı:SCN5A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300261	Alfa-1-Antitripsin (AAT) eksikliği Gen Adı:SERPINA1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331820	Hereditör Anjioödem Gen Adı:SERPING1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332049	Lenfoproliferatif sendrom, 1 Gen Adı:SH2D1A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300592	Cherubism Gen Adı:SH3BP2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300593	Leri-Weill diskondrosteozu / Boy kısalığı, ailevi Gen Adı:SHOX	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331830	Sükraz-izomaltaz eksikliği Gen Adı:SI	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53331840	İdiyopatik Genaralize Epilepsi / GLUT1 eksikliği Gen Adı:SLC2A1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300594	Glikojen depo hastalığı Ib-Ic Gen Adı:SLC37A4	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331850	Serebral Kreatin Eksikliği sendromu tip 1 Gen Adı:SLC6A8	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300595	Spinal Müsküler Atrofi (SMA) - Dizi Analizi Gen Adı:SMN1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331928	Spinal Müsküler Atrofi (SMA) - MLPA Analizi Gen Adı:SMN1-SMN2	MLPA Analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	21	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333186	Niemann-Pick Hastalığı Tip A,B Gen Adı:SMPD1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333187	Cinsiyet Gelişim Bozukluğu 10 / Kampomelik displazi Gen Adı:SOX9	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332048	5α-Redüktaz Yetmezliği Tip 2 Gen Adı:SRD5A2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331880	Cinsiyet Gelişim Bozukluğu 1 Gen Adı:SRY	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transpor t Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

330067	Y kromozom mikrodelsyonu - 20 STR Gen Adı:SRV	Jel elektroforezi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300642	Y kromozomu (AZFb) genişletilmiş panel - 7 STR Gen Adı:SRV	Jel elektroforezi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331890	Peutz-Jeghers sendromu Gen Adı:STK11	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300596	Hemofagositik lenfositosis, ailesel 4 Gen Adı:STK11	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332047	Osteopetrozis Gen Adı:TCIRG1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300597	İmmün yetmezlik 75 Gen Adı:TET2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300598	İmmün yetmezlik 74, COVID19-ilişkili Gen Adı:TLR7	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333190	Ailesel Periyodik Ateş Gen Adı:TNFRSF1A	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331910	Kardiyomyopati dilate 12 / hipertrofik 13 Gen Adı:TNNC1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53331920	Kardiyomyopati dilate 1FF / hipertrofik 7 Gen Adı:TNNI3	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331930	Kardiyomyopati dilate 1D / hipertrofik 2 Gen Adı:TNNT2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333194	Li-Fraumeni Sendromu Gen Adı:TP53	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331950	Kardiyomyopati dilate 1Y / hipertrofik 3 Gen Adı:TPM1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331960	Tüberosklerozis tip 1 Gen Adı:TSC1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331970	Tüberosklerozis tip 2 Gen Adı:TSC2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333198	Transtiretin ilişkili amiloidoz Gen Adı:TTR	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300599	Mitochondrial DNA depresyon sendromu (MNGIE) Gen Adı:TYMP	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
53331990	Von Willebrand Hastalığı Gen Adı:VWF	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

TEST LİSTESİ

53332000	Wilms tümörü / Denys-Drash sendromu / Fraiser sendromu Gen Adı:WT1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300600	Mowat-Wilson sendromu Gen Adı:ZEB2	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3302011	Adrenolökodistrofi Gen Adı:ABCD1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332110	Multipl Endokrin Neoplazi Gen Adı:MEN1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333209	Creutzfeldt-Jakob hastalığı / Gerstmann-Straussler hastalığı Gen Adı:PRNP	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3332001	Spastik Tetrapleji ve Aksiyal Hipotoni,İlerleyici Gen Adı: SOD1	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	60	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3332002	Trimethylaminuria - FM03 Dizi Analizi Gen Adı:FM03	Dizi analizi	EDTA'lı kan/AS/CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300483	Mutasyon Doğrulama (Tek bölge)	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	30	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300517	APOB Analizi Gen Adı:APOB	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

331931	MTHFR mutasyon analizi - A1298C Gen Adı:MTHFR	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330054	MTHFR mutasyon analizi - C677T Gen Adı:MTHFR	Dizi analizi	EDTA'lı kan	EDTA	2-3ml	4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3332003	Noonan Sendromu(Ekzon 3-4-7-8-9-13-14) Prenatal	Dizi analizi	EDTA'lı kan+/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3332004	Spinal Musküler Atrofi (SMA) MLPA Analizi Prenatal Tanı	MLPA Analizi	EDTA'lı kan+/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300647	FTL Geni Dizi Analizi Gen Adı: FTL	Dizi analizi	EDTA'lı kan+/AS/ CVS	EDTA/Enjektör/Transport Besiyeri	2-3 ml/15-20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	40	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300294	Kimerizm analizi - FISH analizi ile <i>Kemik iliği (Ki) transplantasyonu sonrası</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Kemik iliği (heparin)	Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333058	FISH Analizi - EML4/ALK	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333022	FISH analizi - 1p36&19q13 <i>1p36 ve 19q13 delesyonları</i>	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333024	FISH analizi - 11q22.3 (ATM) <i>Yeniden düzenlenme ve translokasyon</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

333045	FISH analizi - 13q14 (RB1) <i>RB1 geninde delesyon</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	7	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333029	FISH analizi - 13q14.3 (D13S319) <i>13q14.3 gen bölgesinde delesyon</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333040	FISH analizi - 13q34 (LAMP1) <i>Yeniden düzenlenme ve translokasyon</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333078	FISH analizi - 14q32 (IGH) <i>Yeniden düzenlenme ve translokasyon</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333043	FISH analizi - 17p13.1 (p53) <i>P53 geninde delesyon</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333041	FISH analizi - 18q21 (MALT1) <i>Translokasyonlar ve kromozom 18 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333061	FISH analizi - 20q- <i>20q13.2 veya 20q delesyonu</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333031	FISH analizi - 5/5q- (EGR1) <i>5q31 veya kromozom 5 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330089	FISH analizi - 7/7q- (7q31) <i>7q31 veya kromozom 7 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

333028	FISH analizi - 8q24 (C-myc) Yeniden Düzenlenmeleri <i>8q24 amplifikasyonu</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kemik iliği (heparin)/Parafin Blok	Heparin / -	2-3 ml	25°C	Pazartesi	3	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
333054	FISH analizi - C-MET (7q31.2) <i>7q31.2 amplifikasyonu ,kromozom 7 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kemik iliği (heparin)/Parafin Blok	Heparin / -	2-3 ml	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333053	FISH analizi - EGFR (7p12) <i>7p12 amplifikasyonu ve kromozom 7 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan-Kemik iliği (heparin)/Parafin Blok	Heparin / -	2-3 ml	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333032	FISH analizi - Her2/neu (17q11.2-12) <i>c-erbB2 amplifikasyonu ve delesyonu</i>	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333038	FISH analizi - Kromozom 12 (+12) <i>Kromozom 12 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333039	FISH analizi - Kromozom 8 (+8) <i>Kromozom 8 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333062	FISH analizi - N-MYC (2p24.3) <i>2p24.3 amplifikasyonu ve kromozom 2 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333046	FISH analizi - t (12;21) (TEL/AML1) <i>12q13.2 ile 21q22.12 translokasyonu ve füzyonu</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333042	FISH analizi - t(?;11q23) (MLL) Yeniden Düzenlenmeleri <i>11q23 yeniden düzenlenme ve translokasyonları</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333060	FISH analizi - t(?;19p13.3) (E2A) Yeniden Düzenlenmeleri <i>19p13.3 yeniden düzenlenme ve translokasyonları</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333063	FISH analizi - t(?;22q12) (EWSR1) Yeniden Düzenlenmeleri <i>22q12 yeniden düzenlenme ve translokasyonları</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333034	FISH analizi - t(11;14) (CCND1/IGH) <i>11q13 ile 14q32 translokasyonu ve füzyonu</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333059	FISH analizi - t(14;16) (IGH/MAF) <i>14q32 ile 16q23 translokasyonu ve füzyonu</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333033	FISH analizi - t(14;18) (IGH/BCL2) <i>14q32 ile 18q21 translokasyonu ve füzyonu</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333044	FISH analizi - t(15;17) (PML/RARA) <i>15q22 ile 17q21 translokasyonu ve füzyonu</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.

333027	FISH analizi - t(16;16) ve inv(16) (CBFB) 16p13 ile 16q22 translokasyonu ve inversiyon	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333035	FISH analizi - t(4;14) (IGH/FGFR3) 4p16 ile 14q32 translokasyonu	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333036	FISH analizi - t(8;14) (IGH/MYC) 8q24 ile 14q32 translokasyonu ve füzyonu	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333023	FISH analizi - t(8;21) (ETO/AML1) 21q22 ile 8q22 translokasyonu ve füzyonu	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333025	FISH analizi - t(9;22) (BCR/ABL) 22q11.2 ile 9q34 translokasyonu ve füzyonu	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333047	FISH analizi - Top2A (17q21-22) Topoisomerase II-alpha amplifikasyonu ve delesyonu	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
332084	FISH Analizi - ROS1 (6q22.1)	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333064	FISH Analizi - PDL1 - PDL2 (9p24.1)	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333075	FISH Analizi -NTRK1	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333076	FISH Analizi -NTRK2	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333077	FISH Analizi -NTRK3	FISH analizi	Parafin blok	-	1 adet	25°C	Pazartesi	7	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300548	FISH Analizi - 20q13 amplifikasyon AURKA (20q13)	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300549	FISH analizi - t(14;20) (IGH/MAFB)	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300551	FISH analizi - Kromozom 4 (+4) Kromozom 4 anöloidisi	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300552	FISH analizi - Kromozom 7 (+7) Kromozom 7 anöloidisi	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300553	FISH analizi - Kromozom 10 (+10) Kromozom 10 anöloidisi	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.

3300554	FISH analizi - Kromozom 13 (+13) <i>Kromozom 13 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300555	FISH analizi - Kromozom 14 (+14) <i>Kromozom 14 anöploidisi</i>	FISH analizi	Periferik Kan/Parafin blok/Kemik iliği	Heparin / - / Heparin	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	3	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
331956	BRAF geni dizi analizi <i>(ekzon 11 ve 15)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	10	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
332095	Braf DNA analizi - ekzon 15 (Kodon 600 dahil) <i>Kolorektal Kanserler Akciğer Kanseri Malign Melanom Non-Small Cell Akciğer Kanseri (NSCLC) Papiller Tiroid Kanseri Non Hodgkin Lenfoma(NHL) Vectibix (Panitumumab)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu Parafin blok Lenfoid doku	-	1 adet	25°C	Her Gün	10	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
5331900	CHEK2 geni dizi analizi <i>(ekzon 9 ve 10)</i>	DNA analizi	Kan (EDTA) Taze tümör dokusu / Parafin Blok	EDTA	2-3 ml	4°C / 25°C	Her Gün	10	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
330076	EGFR geni dizi analizi <i>(ekzon 18, 19, 20, 21)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300271	ASXL1 geni dizi analizi <i>(ekzon 12)</i>	DNA analizi	Kan (EDTA) / Kemik iliği (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pihtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332007	HRAS geni dizi analizi <i>(ekzon 1 ve 2)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	10	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
332008	IDH1 geni dizi analizi <i>(ekzon 4)</i>	DNA analizi	Kemik iliği (EDTA) /Parafin Blok	EDTA	1-3 ml / 1 adet	4°C / 25°C	Her Gün	10	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
332009	IDH2 geni dizi analizi <i>(ekzon 4)</i>	DNA analizi	Kemik iliği (EDTA) / Parafin Blok	EDTA	1-3 ml / 1 adet	4°C / 25°C	Her Gün	10	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
330102	JAK2 DNA analizi - V617F mutasyonu <i>Esansiyel Trombositemi (ET) Hipereozinofilik Sendrom HES) Kronik Myelomonositik Lösemi (KMML) Myelodisplastik Sendromlar (MDS) Myelofibrozis ile giden Myeloid Metaplazi Nötrofilik Lösemi (NL) Polisitemia Vera (PV) Mast Hücreli Lösemi Mastositosis</i>	DNA analizi	Kan (EDTA) Kemik iliği (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pihtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300160	JAK2 DNA analizi - Ekzon 12 <i>Esansiyel Trombositemi (ET) Hipereozinofilik Sendrom HES) Kronik Myelomonositik Lösemi (KMML) Myelodisplastik Sendromlar (MDS) Myelofibrozis ile giden Myeloid Metaplazi Nötrofilik Lösemi (NL) Polisitemia Vera (PV) Mast Hücreli Lösemi Mastositosis</i>	DNA analizi	Kan (EDTA) Kemik iliği (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330105	C-KIT dizi analizi <i>(ekzon 8, 9, 10, 11, 13 ve 17)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk, Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300435	Kimerizm analizi - PCR analizi ile <i>(Alıcı-Verici; 2 örnek)</i>	DNA analizi	Kan (EDTA) ve Swab	EDTA	2-3 ml / 1 adet	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300436	Kimerizm analizi - PCR analizi <i>(Tek Örnek)</i>	DNA analizi	Kan (EDTA) ve Swab	EDTA	2-3 ml / 1 adet	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331938	KRAS mutasyon analizi <i>(Kodon 12,13, 59, 61,117, 146)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	4°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk, Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
331957	Mikrosatellit instabilitesi (MSI)	Fragman analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok + Kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	25°C / 4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
332012	NRAS mutasyon analizi <i>(Kodon 12,13, 59, 61,117, 146)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk, Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
331962	P16 (CDKN2A) geni dizi analizi <i>(tüm gen)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk, Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
330119	P53 geni dizi analizi <i>(tüm gen)</i>	DNA analizi	Kan (EDTA) Taze tümör dokusu / Parafin Blok	EDTA	2-3 ml / 1 adet	4°C / 25°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk, Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
332013	PIK3CA geni dizi analizi <i>(ekzon 9,20)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	10	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk, Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
331997	PTEN geni dizi analizi <i>(tüm gen)</i>	DNA analizi	Taze tümör dokusu / Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	21	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk, Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
333134	BCR/ABL (9;22) Real Time PCR	RT-PCR	Kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	24 saati geçmeden örnek laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yetersiz numune kabul edilmemektedir. Nakliye koşulları 4°C de olmalıdır.

3300465	RET geni dizi analizi (ekzon 10,11,13, 14,15,16)	DNA analizi	Kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300256	TET2 geni dizi analizi (tüm gen)	DNA analizi	Kemik iliği (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300470	OnkoGenetiks Moleküler Profilendirme ve TMB (Tümör mutasyon yükü + 486 gen dizi analizi + MSI analizi)	Yeni Nesil Dizileme	Solid Tümör-Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	15-21	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3319902	OnkoGenetiks Moleküler Profilendirme ve TMB + Patoloji Konsültasyonu mutasyon yükü + 486 gen dizi analizi + 75 bölge füzyon analizi+ MSI analizi+ PDL1+ CD8 (IHC) ve patoloji konsültasyonu ile OnkoGenetiks Füzyon Panelleri Dahildir	Yeni Nesil Dizileme-Fragman Analizi-FISH ve IHC	Solid Tümör-Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	21	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300472	OnkoGenetiks Likit Biyopsi gene ait nokta mutasyonları içerir) (63)	Yeni Nesil Dizileme	PaxGene Tüp / Parafin Blok	PaxGene Tüp / 1 adet	10 ml / -	25°C	Her Gün	21	Numune miktarının 5ml'in altında kalması, pıhtılaşmış örnekler, yanlış tüpe numune alınması , yetersiz numune
3300495	OnkoGenetiks BRCA1 ve BRCA2 geniz dizi analizi (BRCA1 ve BRCA2 genlerine ait dizi analizlerini kapsar. ~100X coverage- CNV Analizi Dahildir)	Yeni Nesil Dizileme	Kan (EDTA) / Solid Tümör-Parafin Blok	EDTA	2-3 ml / 1 adet	4°C / 25°C	Her Gün	21	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300474	OnkoGenetiks Meme-over plus BRCA1,BRCA2,TP53,CDH1,PTEN,PALB2 genlerine ait dizi analizlerini kapsar. ~100X coverage- BRCA1/2 genlerinde CNV Analiz Dahildir.	Yeni Nesil Dizileme	Kan (EDTA) / Solid Tümör-Parafin Blok	EDTA	2-3 ml / 1 adet	4°C / 25°C	Her Gün	21	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300486	OnkoGenetiks Herediter Kanser Paneli Ailesel kanserler ile ilişkili 275 gen bölgesi analiz edilir.	Yeni Nesil Dizileme	Kan (EDTA) / Solid Tümör-Parafin Blok	EDTA	2-3 ml / 1 adet	4°C / 25°C	Her Gün	21	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3300196	Prosigna Testi PAM50 (50 farklı gen ekspresyonu ile meme kanseri prognozu hakkında bilgi verir.tümör büyüklüğü ve nodal duruma göre 10 yıllık süreç içerisinde hastalığın tekrarlaması riski konusunda bilgi verir ve hastaların risk açısından düşük, intermediate ve yüksek olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılmasını sağlar)	Gen ekspresyonu	Solid Tümör-Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
53319901	Mammaprint Testi	Gen ekspresyonu	Solid Tümör-Parafin Blok	-	1 adet	25°C	Her Gün	15	Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk,Gönderilen parafin doku adedinin 4 ve üzeri olması durumunda patoloji raporunun gönderilmemesi.
3302008	Genetiks Yeni Nesil Tanı Paneli 4800'den fazla gen bölgesi inceleme, isteğe özgün gen panel analizi yapılır	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300420	Genetik Yeni Nesil Tanı Paneli Paketi ++	Yeni Nesil Dizileme +Karyotip Analizi +SNP Array 300K	EDTA Kan /Heparin Kan	EDTA / Heparin	2-3 ml ve 2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300422	Genişletilmiş Epilepsi Paneli <i>Güncel literatürlerdeki Epilepsi ile ilişkili Genler taranır.</i>	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300423	Otizm- Gelişme Geriliği Araştırma Paneli <i>Güncel literatürlerdeki Otizm ile ilişkili Genler taranır.</i>	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300424	Otizm Araştırma Paneli +++ <i>Güncel literatürlerdeki Otizm ile ilişkili Genler taranır+ Karyotip Analizi+ 300K Illumina SNP Array Analizi+ Frajil X CGG Tekrar Sayısı Analizi</i>	Yeni Nesil Dizileme +Karyotip Analizi +SNP Array 300K	EDTA Kan ve Heparin Kan	EDTA / Heparin	2-3 ml ve 2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300148	Tüm Ekzom Dizileme (WES) Analizi (İndeks) <i>~22.000 gen bölgesine ait ekzon ve ekzon-intron birleşme bölgelerini analiz eder.</i>	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300427	Tüm Ekzom Dizileme (WES) Analizi++	Yeni Nesil Dizileme +Karyotip Analizi +SNP Array 300K	EDTA Kan ve Heparin Kan	EDTA / Heparin	2-3 ml ve 2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300218	Tüm Ekzom Dizileme (WES) ve CNV Analizi <i>~22.000 gen bölgesine ait ekzon ve ekzon-intron birleşme bölgelerini ve CNV'leri analiz eder.</i>	Yeni Nesil Dizileme ve CNV Analizi	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300425	Tüm Ekzom Dizileme (WES) Analizi- Trio <i>~22.000 gen bölgesine ait ekzon ve ekzon-intron birleşme bölgelerini analiz eder. Trio analizi Anne-Baba ve Hasta bireyin analizini içerir.</i>	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300428	Tüm Ekzom Dizileme (WES) Analizi++ Trio	Yeni Nesil Dizileme +Karyotip Analizi +SNP Array 300K	EDTA Kan ve Heparin Kan	EDTA / Heparin	2-3 ml ve 2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300429	Tüm Ekzom Dizileme (WES) ve CNV Analizi- Trio ~22.000 gen bölgesine ait ekzon ve ekzon-intron birleşme bölgelerini ve CNV'leri analiz eder. Trio Anne-Baba ve hasta bireyin analizini içerir.	Yeni Nesil Dizileme ve CNV Analizi	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300546	Tüm Ekzom Dizileme (WES) Analizi (İndeks) Prenatal Tanı ~22.000 gen bölgesine ait ekzon ve ekzon-intron birleşme bölgelerini analiz eder. Maternal Kontaminasyon testi dahildir.	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan Kordonsentez Amniyosentez CVS	EDTA / Enjektör / Transport Besiyeri	2-3 ml/15- 20ml/30-50µg	4°C	Her Gün	30-45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300396	Tüm Genom Dizileme (WGS) Analizi Tüm genom CNV'leri ile haritalanır. Tüm ekzon ve Intron bölgeleri analiz edilir.	Yeni Nesil Dizileme ve CNV Analizi	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300430	Tüm Genom Dizileme (WGS) Analizi- Trio Tüm genom CNV'leri ile haritalanır. Tüm ekzon ve Intron bölgeleri analiz edilir. Aile çalışması ile birlikte yapılır. (Anne-Baba ve etkilenen birey)	Yeni Nesil Dizileme ve CNV Analizi	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300431	Tüm Genom Dizileme (WGS) Analizi ve mtDNA Analizi	Yeni Nesil Dizileme ve CNV Analizi	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300432	Mitokondriyal Genom Analizi (mtDNA) Mitokondriyal genom analiz edilir.	Dizi Analizi	EDTA Kan / Parafin Blok	EDTA	2-3 ml / 1 adet	4°C / 25°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300525	MODY Paneli Gen Adı: GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, KCNJ11, INS, ABCC8, CEL, KLF11, NEUROD1, PDX1, PAX4, BLK, APPL1	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300526	Cinsiyet Gelişim Bozukluğu (CGB) Paneli Gen Adı: AR, SRD5A2, CYP21A2, CYP11B1, CYP19A1, WT1, NR5A1, SRY, SOX9, DHCR7	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300527	Kalıtısal Kardiyak Hastalıklar Paneli Kalıtısal Kalp Hastalıkları ile ilişkilendirilmiş 174 genin analizi	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300528	Mukopolisakkaridozis Paneli Gen Adı: IDUA, IDS, NAGLU, GALNS, GLB1, ARSB, GUSB	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300529	Kalıtımsal İmmun Sistem Hastalıkları Paneli <i>Kalıtımsal İmmun Sistem Hastalıkları ile ilişkilendirilmiş 220 genin analizi</i>	Yeni Nesil Dizileme	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300104	İlaç sensitivite paneli-Geniş Panel Gen Adı:CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300105	İlaç sensitivite paneli - Standart panel Gen Adı:CYP2D6, CYP2C9 ve CYP2C19	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300121	Nöropsikiyatri İlaç Sensitivite Paneli Gen Adı:CYP2D6,CYP2C9,CYP2C19,CYP1A2	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300106	Kumadin Doz Paneli Gen Adı:CYP2C9,VKORC1	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
331968	Plavix Doz Paneli Gen Adı:CYP2C19	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	15	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300458	5-Fluorouracil toksitesi Gen Adı:DPD	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300327	İrinotekan toksitesi Gen Adı:UGT1A1	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300120	Thiopurine toksitesi Gen Adı:TPMT	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300119	İlaç Sensitivitesi Gen Adı:GSTM1	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300195	Tamoksifen Gen Adı:COMT	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300361	Tamoksifen Gen Adı:GSTP1	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300201	Tamoksifen Gen Adı:MnSOD	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330071	VKORC1 mutasyon analizi - 1 polimorfizm -1639C>A Gen Adı:VKORC1	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330070	CYP2C9 mutasyon analizi - 5 polimorfizm CYP2C9*1,*2 ve *3,*4,*5 Gen Adı:CYP2C9	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300108	CYP2C19 mutasyon analizi - 5 polimorfizm CYP2C9 *1,*2, *3, *4 ve *17 Gen Adı:CYP2C19	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300123	CYP2D6 mutasyon analizi - 16 polimorfizm CYP2D6 *1, *2,*3,*4,*6,*7,*8,*9,*10,*11,*12,*14,*17,*29,*39,*41 Gen Adı:CYP2D6	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300112	CYP1A2 mutasyon analizi - 2 polimorfizm CYP1A2*1C ve *1F Gen Adı:CYP1A2	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
330072	CYP3A4 mutasyon analizi - 1 polimorfizm CYP3A4*2 Gen Adı:CYP3A4	Mini Sekans	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300114	SSRI cevabı - 5HTT (SCL6A4) mutasyon analizi -Jel Short allele	Jel Elektroforezi	Periferik kan (EDTA)	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	10	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300238	NutriGenetiks 'Sağlık' <i>*C/D vitamini, Folik Asit, Glisemik yük, omega-3 yağ asitleri, sodyum, kafein, doymuş yağlar, laktoz, gluten</i>	Dizi Analizi	EDTA kan Buccal Swab	EDTA / Swab	2-3 ml	4°C	Her Gün	14	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300182	GeneSport Paneli Gen Adı:ACTN-3, ACE	Dizi Analizi	EDTA kan Buccal Swab	EDTA / Swab	2-3 ml	4°C	Her Gün	14	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300184	GeneSport X (Genişletilmiş Panel) Gen Adı:ACTN-3, ACE, IL-6, DIO1, VEGFR, NOS3, PPARGC1A, PPARG	Dizi Analizi	EDTA kan Buccal Swab	EDTA / Swab	2-3 ml	4°C	Her Gün	14	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300530	GeneSport Recovery & Injury Gen Adı:COL1A1, GDF5, SOD2, IL6, IL6R, TNF, CRP	Dizi Analizi	EDTA kan Buccal Swab	EDTA / Swab	2-3 ml	4°C	Her Gün	14	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300531	Sağlık ve Spor Paneli <i>GeneSport X (Genişletilmiş Panel)</i> <i>GeneSport Recovery & Injury</i> <i>NutriGenetiks Sağlık</i>	Dizi Analizi	EDTA kan Buccal Swab	EDTA / Swab	2-3 ml	4°C	Her Gün	14	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune
3300532	Genetiks 360 Genişletilmiş Taşıyıcılık Paneli Gen Adı:22.000 gen bölgesi	Yeni Nesil Dizi Analizi	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none"> • Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler • Pıhtılaşmış örnekler • Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk • Nakliye süresini geçen numuneler • Nakliye sırasında sızan numune

3300557	Genetiks 180 Genişletilmiş Taşıyıcılık Paneli <i>Türk toplumunda sık görülen 202 gen dizi analizi yapılır. SMA ve Frajil-X ek yöntemle analiz edilir.</i>	Yeni Nesil Dizi Analizi	EDTA Kan	EDTA	2-3 ml	4°C	Her Gün	45	<ul style="list-style-type: none">• Yanlış tüpte alınan veya yanlış taşınan numuneler• Pıhtılaşmış örnekler• Numune üzerindeki hasta adı ile istek formu arasında uyumsuzluk• Nakliye süresini geçen numuneler• Nakliye sırasında sızan numune
3300558	NIPT24 Genişletilmiş Anne Kanından Fetal DNA Testi 24 Kromozom NIPT ve ≥7 Mb tüm CNV analizi- IVD-CE	Yeni Nesil Dizileme	Özel Tüp	STRECK	10 ml	25°C	Pazartesi	10	Örnek streck tüpe alınmalıdır, farklı tüpe alınan numuneler kabul edilmemektedir. Gebeliğin 10. haftasından önce alınan numuneler kabul edilmemektedir.